



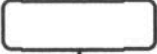
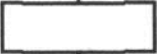
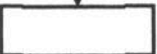



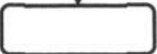


RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
Jalan Pasteur No. 38 Bandung

**DOKUMEN
MASTER**

	Nomor SOP	D.XIV/6.4/10/0012
	Tanggal Pembuatan	18 Januari 2014
	Tanggal Revisi	20 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	10 November 2025
	Disahkan oleh	 Direktur Utama  dr. H.Rachim Dinata Marsidi, Sp.B, FINAC., M.Kes NIP: 919550103202407101
	Nama SOP	DISINFEKSI DAN PEMBERSIHAN DRESSING CARD/ TROLI TINDAKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor HK.02.03/D.XIV.6.2.2/23511/2024 Tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung	1. Petugas Kesehatan (Perawat, Bidan, pekarya, Cleaning Service)	
Keterkaitan : 1. SPO Pemakaian dan Pelepasan APD 2. SPO Pelaksanaan Kebersihan Tangan Menggunakan Sabun dan Air Mengalir (Hand Washing)	Peralatan / Perlengkapan : 1. Alat Non Kritis (Dressing Card / Meja Tindakan) 2. Alkohol 70% 3. Kain Sintetis, Microfiber yang lembut	
Peringatan		
Apabila prosedur disinfeksi dan pembersihan dressing card/troli tindakan tidak di taati dapat beresiko terjadi paparan infeksi terhadap pasien, petugas dan lingkungan		

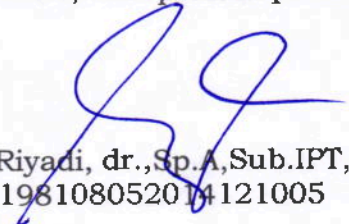
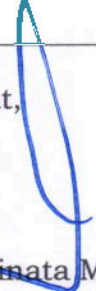
DISINFEKSI TROLLY TINDAKAN

No	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Petugas medis, petugas non medis, Petugas kesehatan lainnya, Peserta didik	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Melakukan persiapan alat		Trolley tindakan didesinfeksi : Dressing Card, Meja/ TrolleyTindakan) - Cairan Desinfektan, - Kain perca/ Microfiber, - Sarung tangan, - Tempat sampah	2 menit	Alat-alat tersedia	
2	Melakukan kebersihan tangan		Sabun + air mengalir, tissue, tempat sampah non infeksius. cairan berbasis alkohol	1 Menit	tangan bersih	Melakukan kebersihan tangan sesuai dengan SOP Kebersihan tangan
3	Memakai sarung tangan		Sarung tangan non steril	1	sarung tangan dipakai dengan tepat	Memakai sarung tangan sesuai SOP pemakaian dan pelepasan APD
4	Melakukan pembersihan troli tindakan		Trolley tindakan didesinfeksi : Dressing Card, Meja/ TrolleyTindakan) - Cairan Desinfektan, - Kain perca/ Microfiber, - Sarung tangan, - Tempat sampah	5-10	trolley tindakan bersih dan dapat digunakan kembali	Basahi kain perca/ mikrofiber dengan cairan disinfektan. Lalu usapkan di permukaan troli tindakan dengan tehnik satu arah, dari kiri ke kanan.
5	Buang kain perca yang telah digunakan ke tempat sampah infeksius.		Tempat infeksius, Tempat sampah non infeksius. Ember linen kotor infeksius, ember linen non infeksius	0,5 Menit		Bila kain perca terkena cairan tubuh pasien buang kain perca ke tempat sampah infeksius. bila tidak terkena cairan tubuh pasien buang ke tempat sampah non infeksius. Mikrofibre terkena cairan tubuh pasien masukkan ke dalam ember
6	Lepaskan sarung tangan		sarung tangan. Tempat non infeksius	0,5 Menit		lepasakan sarung tangan dengan tepat dan buang ke tempat sampah infeksius
7	Melakukan kebersihan tangan		Sabun + air mengalir, tissue, tempat sampah non infeksius. cairan berbasis alkohol	1	tangan menjadi bersih	Melakukan kebersihan tangan sesuai dengan SOP Kebersihan tangan



RSUP Dr. Hasan Sadikin
Bandung

FORMULIR PEMBUATAN/REVISI DOKUMEN*)

Nama dokumen	: Disinfeksi dan Pembersihan <i>Dressing Card</i> Troli Tindakan	
Nomor dokumen	: D.XIV/6.4/10/0012	
Tanggal terbit	: 10 November 2025	Nomor revisi : 01
Deskripsi pembuatan/revisi *)		
SOP Disinfeksi dan Pembersihan <i>Dressing Card</i> Troli Tindakan		
Alasan pembuatan/revisi/risiko *)		
<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya revisi SOP Disinfeksi dan Pembersihan <i>Dressing card</i> Troli Tindakan sebagai dasar acuan petugas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi pada pasien secara tidak langsung melalui media peralatan medis atau lingkungan pasien2. SOP Disinfeksi dan Pembersihan <i>Dressing Card</i> Troli Tindakan adanya penambahan pada dasar hukum, keterkaitan dan point mutu baku		
Pemohon/unit pemilik proses	Direktur terkait,	
 Dr. Riyadi, dr., Sp.A, Sub.IPT, M.Kes NIP 198108052014121005	 dr. H. Rachim Dinata Marsidi, Sp.B, FINAC., M.Kes NIP 91955010320247101	

*) coret yang tidak perlu

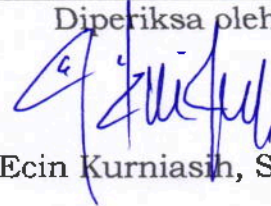
RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Diselesaikan oleh:



Nandang Mustari Aji, S.Kep.,Ners

Diperiksa oleh:

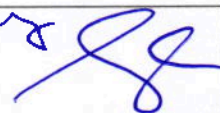






Elis Ecin Kurniasih, S.Kep.,Ners

Bandung, 10 Oktober 2025

Judul konsep

Disinfeksi dan Pembersihan *Dressing Card Troli Tindakan*

no	Nama/jabatan	Masukan-masukan
1	Ketua Komite PPI	Jenny Trug 
2	Manager Tim Kerja Pelayanan keperawatan	Setyo Rendi Sop 
3	Kepala Instalasi Intensif Inap 24	Setyo 
4	Kepala Instalasi Rawat Inap Intensif 24	Azu 
5	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Azu 

Ditetapkan

.....

NIP.....